




VAKUFORM

Ballpumpe Bedienungsanleitung

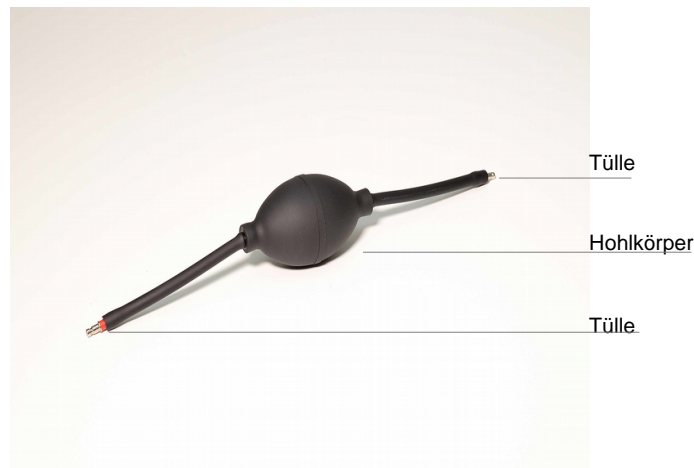

Verwendungszweck

Die Ballpumpe wird zur Be- und Entlüftung eines **VAKUFORM** Vakuumsystems verwendet. Sie wird von Hand bedient. Der Pumpvorgang entsteht durch zusammendrücken des Hohlkörpers. Die Verbindung erfolgt durch Einstecken der Metalltülle in das Belüftungsventil bis diese einrastet.

Funktion

Luft evakuieren (Absaugen): Verbinden sie das farblich rot gekennzeichnete Ende mit dem Belüftungsventil.

Luft hineinpumpen: Verbinden sie das nicht farblich gekennzeichnete Ende mit dem Belüftungsventil.

Trennung Ventil von der Tülle

Durch zurückziehen der **Arretierungshülse (1)** werden Ventil und Tülle getrennt.



WICHTIG

Vermeiden sie immer ein übermäßiges Aufpumpen des **VAKUFORM** Systems (Balloneffekt).



Die Ballpumpe muss nach jedem Pumpvorgang vom **VAKUFORM** System getrennt werden, da sonst ungewollt Luft in das System eindringen kann.



Artikel:	Doppelfunktions-Ballpumpe
Bestell-Nr.:	30000
Material:	SAROLIT®, physiologisch unbedenklich, phthalatfrei, cadmiumfrei, latexfrei
Gewährleistung:	2 Jahre
EAN:	4260731383001